

NaTALIA Pränataltest

Anleitung zur Blutentnahme und zum Versand der Blutproben

Zur Durchführung des **NaTALIA** Pränataltests steht das **LADR Entnahmeset zur Verfügung (Best.-Nr. 187999)**.

- Anforderungsschein NaTALIA Pränataltest
- Anleitung zur Blutentnahme und zum Versand der Blutproben
- Vacutainer Blutentnahme-Röhrchen (Streck Tube)
- Vacutainer Butterfly Safety-Lok
- Vacutainer-Halter
- Schutzgefäß für das Blutröhrchen mit saugfähiger Einlage (für den Rückversand)
- Druckverschlussbeutel
- Rücksendebox
- Informations-Flyer für Patienten

Bestellen Sie diesen Artikel bei unserem Partner Intermed:

Freecall: 0800 08 50-113


Freefax: 0800 08 50-114

www.intermed.de

Vorgehen bei der Blutentnahme

Beschriften Sie das Blutentnahme-Röhrchen mit Name, Vorname, Geburtsdatum und kleben Sie den Barcode auf.

- 1.** Drehen Sie das Butterfly Safety-Lok Blutentnahmeset in den Vacutainer-Halter.
- 2.** Führen Sie die Venenpunktion am gesenkten Arm durch. Eine kleine Menge Blut fließt in den Schlauch.
- 3.** Stecken Sie das Blutentnahme-Röhrchen vollständig in den Halter und durchstechen Sie den Gummipfropfen. Das Vakuum wird freigegeben und das Röhrchen füllt sich. Halten Sie das Röhrchen bei der Entnahme aufrecht. Erst wenn es sich ganz gefüllt hat, ziehen Sie es aus dem Halter (Mindestprobenmenge 5 ml).
- 4. Wichtig! Drehen Sie das Röhrchen 10 Mal über Kopf.**

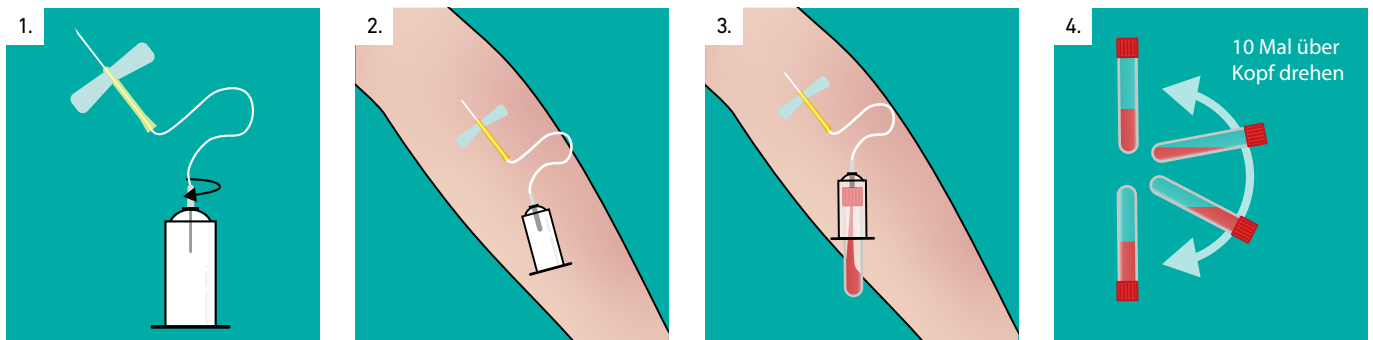

NaTALIA Pränataltest

Lagerung und Versand der Proben

- **Die Blutproben können bei Raumtemperatur gelagert werden. Ein Temperaturbereich von 6°C bis 37°C ist unkritisch. Bei längerer Lagerung in der Praxis (über Nacht) bitten wir um Aufbewahrung im Kühlschrank.**
- Zum Versand Blutproben in die Umverpackung geben und mit dem ausgefüllten Untersuchungsauftrag in die Transportbox legen.
- Die Proben können wie gewohnt mit dem Fahrdienst ins Labor befördert werden.
- Für eine gesonderte Abholung wenden Sie sich gern an unseren Partner Intermed Logistik, **T: 0700 88 21-80 00** (Festnetzpreis max. 14 ct./Min., Mobilfunktarife abweichend), **logistik@intermed.de**

Die Proben sollten idealerweise am Tag der Entnahme in Ihrem LADR Labor vor Ort eintreffen, das den Transport an das LADR Laborzentrum Recklinghausen organisiert. Bitte planen Sie die Blutentnahme so, dass die Proben zumindest vor dem Wochenende oder vor Feiertagen abgeholt werden können und nicht in Ihrer Praxis verbleiben.



Sie haben noch Fragen?

Alle (Fach-) Informationen für Ärzte und Patienten sowie ein Aufklärungsvideo zum NaTALIA Pränataltest finden Sie unter www.LADR.de/nipt

Im LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen werden Sie gerne beraten.

**LADR Laborzentrum
Baden-Baden**
T: 07221 21 17-0

**Hormonzentrum
Münster**
T: 0251 871 13-23

**LADR Laborzentrum
Nord-West, Schüttorf**
T: 05923 98 87-100
Zweigpraxis Leer
T: 0491 454 59-0

**MVZ Labor Dr. Klein
Dr. Schmitt GmbH**
Kaiserslautern
T: 0631 303 24-0

**LADR Laborzentrum
Berlin**
T: 030 30 11 87-0

**LADR Laborzentrum
an den Immanuel Kliniken,
Hennigsdorf**
T: 03302 20 60-100
**Zweigpraxis Bernau,
Zweigpraxis Rüdersdorf**

**LADR Laborzentrum
Paderborn**
T: 05251 28 81 87-0

Partner des Labor-
verbundes:
LIS Labor im Sommershof,
Köln
T: 0221 93 55 56-0

**LADR Laborzentrum
Bremen**
T: 0421 43 07-300

**LADR Laborzentrum
Neuruppin**
T: 03391 35 01-0

**LADR Laborzentrum
Recklinghausen**
T: 02361 30 00-0

**LADR Der Laborverbund
Dr. Kramer & Kollegen GbR**
Lauenburger Straße 67
21502 Geesthacht
T: 04152 803-0
F: 04152 803-369
interesse@LADR.de

**LADR Laborzentrum
Hannover**
T: 0511 901 36-0

**LADR Laborzentrum
Nord, Flintbek**
T: 04347 90 80-100
Zweigpraxis Eutin

**LADR Zentrallabor
Dr. Kramer & Kollegen,**
Geesthacht
T: 04152 803-0

Der Laborverbund dient ausschließlich der Präsentation unabhängiger LADR Einzelgesellschaften.

LADR