


Anleitung zur Probengewinnung und zum Versand

SARS-CoV-2 PCR-Diagnostik aus Mundspülwasser

Der Nasopharyngealabstrich gilt als Goldstandard für die Gewinnung von Material vom Ort der Virusreplikation. Für die wiederholte Untersuchung, z. B. von Mitarbeitern, sowie zur einfachen Abnahme bei Patienten/Probanden in Hygienekonzepten ist das Verfahren jedoch weniger geeignet. Hier bietet sich, zum molekularbiologischen Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer RNA, Mundspülwasser zur Probengewinnung an.

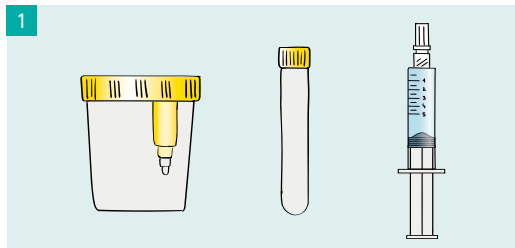


- 1 Für die Durchführung erforderlich: Mundspülwasser-Testset (Best.-Nr. 187901): 1x Auffangbecher mit Transfereinheit, 1x Monovette, 1x 5 ml Spritze mit 0,9%iger NaCl-Lösung (Kochsalzlösung), 1x Anleitung.

Proband

- 2 Die Kochsalzlösung (5 ml) in den Mund drücken.

Proband


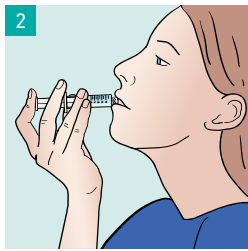


Veranlasser




- 3 Die Flüssigkeit 20x in der Mundhöhle hin- und herbewegen. Ist der Proband allein im Raum, kann er abschließend gurgeln – danach bitte stoßlüften!

- 4 Anschließend die Suspension in den geöffneten Becher spucken und diesen wieder fest verschließen.

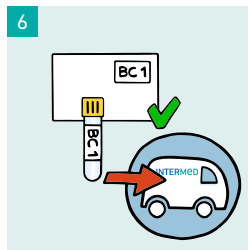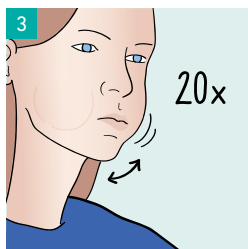

Veranlasser

- 5 Becher schräg halten, Schutzfolie von Deckelöffnung abziehen. Monovette tief hineinschieben, bis Einsaugstutzen in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt und diese in die Monovette steigt. Erreicht die Füllhöhe nicht Daumenbreite, Becher aufschrauben und verbliebene Flüssigkeit vorsichtig (!) in die geöffnete Monovette kippen.

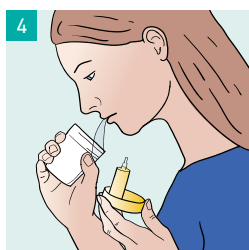

- 6 Die Monovette und den Auftragschein jeweils mit einem Barcode versehen und ins Labor einsenden.

- 7 Testergebnis per QR-Code über mein-laborergebnis.de abrufbar, wenn von Testzentrum, Arztpraxis oder anderem Veranlasser gewünscht. Siehe Anleitung unter www.mein-corona-testergebnis.de

Mundspülwasser-Testset (Best.-Nr. 187901) bei unserem Partner Intermed bestellen:

Freecall: 0800 08 50-113 • Freefax: 0800 08 50-114 • www.intermed.de



Informationen zu den regionalen Facharztlaboren im deutschlandweiten LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen unter www.LADR.de

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen GbR
Lauenburger Str. 67, 21502 Geesthacht, T: 04152 803-0, F: 04152 803-369, interesse@LADR.de

Der Laborverbund dient ausschließlich der Präsentation unabhängiger LADR Einzelgesellschaften.