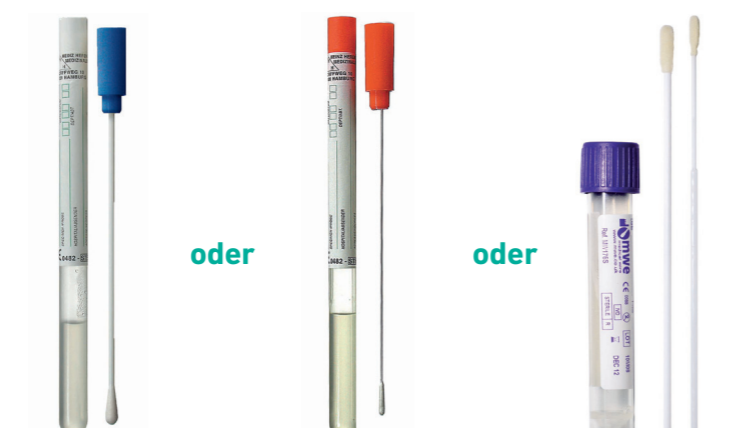

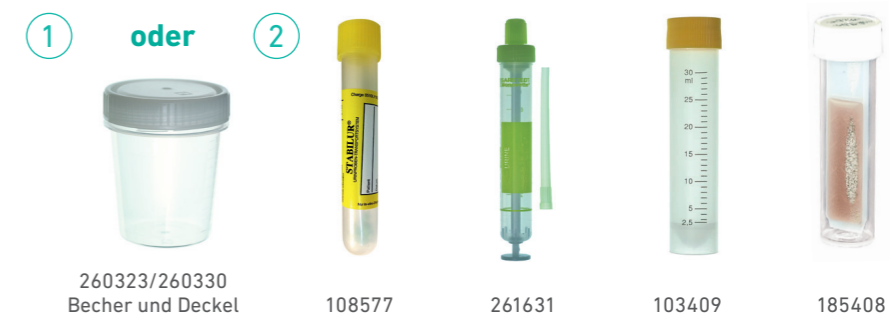




Präanalytik urogenitaler Infektionen

Was – wofür – womit... versenden

| Verfahren Erreger Erkrankung | Material Entnahmeort | Abstrich | Punktat o.ä. | Urin |
|---|--|---|--|--|
| Kultur | | | | |
| Bakterielle Erreger und Resistenz (E&R) Pilze/Hefen Mykoplasmen | Anus, Bartholinischer Abszess, Genitalulkus, Harnröhre, Penis, Prostatasekret, Urethra, Vagina, Vaginalsekret, Vulva, Zervix |  oder | Becher einfach steril verpackt  109434 doppelt steril verpackt (nur für den OP-Saal)  108933 (20 ml) 108935 (100 ml) | 1 Mittelstrahlurin 2 Katheterurin 3 Erststrahlurin je 5–10 ml  |
| Gardnerella vaginalis Gonokokken (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) | |  208232 203413 105972 | Nicht möglich | Nicht möglich |
| B-Streptokokken-Screening Vaginal-/Rektalabstrich | | | | |
| PCR | | | | |
| Chlamydien-PCR (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | |  oder | Becher einfach steril verpackt  109434 doppelt steril verpackt (nur für den OP-Saal)  108933 (20 ml) 108935 (100 ml) | 3  260323/260330 Becher und Deckel oder  399153 |
| Gonokokken-PCR (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) | |  203229 | | |
| Mykoplasmen-PCR (<i>Mycoplasma genitalium/hominis</i> ; <i>Ureaplasma parvum/urealyticum</i>) | |  Nur für HPV-PCR! | | 3  260323/260330 Becher und Deckel oder  261631 |
| Trichomonaden-PCR* (<i>Trichomonas vaginalis</i>) | | | | |
| Ulcus molle* (<i>Haemophilus ducreyi</i> -PCR) | |  oder | | Nicht möglich |
| HPV-PCR (Humane Papillomaviren) | | | Nicht möglich | Nicht möglich |
| Herpes-PCR* (Herpes-simplex-Virus Typ 1/2) | | | Nicht möglich | Nicht möglich |
| Lues, Syphilis* (<i>Treponema pallidum</i> -PCR) | | | Nicht möglich | Nicht möglich |
| Varizellen, Herpes Zoster* (Varizella-Zoster-Virus-PCR) | | 105972 203229 106333 | Nicht möglich | Nicht möglich |

* Keine EBM-Leistungen